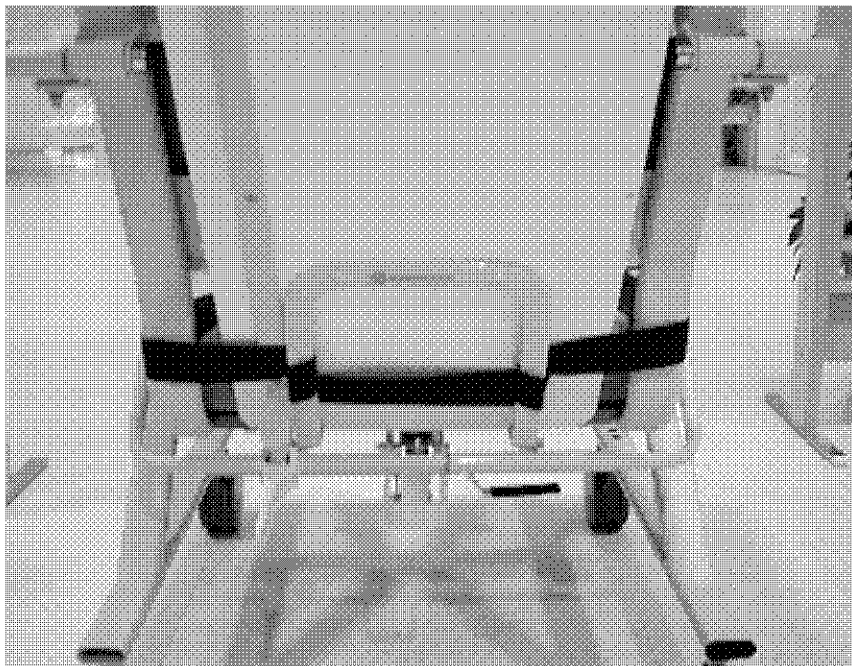


## Anlage zu der Benutzeranleitung des Rosé geriatrischen Stuhles (Hersteller Merivaara Corp.)

### Sehr geehrter Benutzer des Rosé Geriatrischen Stuhles

Wir haben erfahren, dass der als Zusatzteil gelieferte Körpergurt 460 (bei der Benutzung im Zusammenhang des Rosé geriatrischen Stuhls) seine gewünschte Position nicht einhält. Dieses liegt daran, dass keine festen Gurthalterungen vorhanden sind, die den Gurt stabil positionieren. Aus diesem Grunde haben wir begonnen die Struktur des Rosé geriatrischen Stuhles in dieser Hinsicht zu entwickeln. Das neu entwickelte Model soll die körperfixierenden Halterungen für den Gurt enthalten.

Bei der Entwicklungsüberlegungen haben wir festgestellt, dass vorläufig der Haltegurt an dem Haltebügel, hinter dem Rückenteil, so eingeschlaucht werden kann, dass er sich nicht hoch und runter verschieben kann und lässt. (Abbildung Nr. 1)



**Bild 1. Befestigung des Körpergurts 460 (bei Nichtvorhandenheit der vorgesehenen Gurthalterungen)**

Es ist zu beachten, dass bei den nicht vorhandenen Halterungen, der Gurt auf oben vorgeführter Weise zu befestigen ist. Benutzung dieser Befestigungsweise schließt es aus, dass der Patient versehentlich aus dem Stuhl rutscht und sich dadurch tödlich schadet.

#### Merivaara Corp.

Puustellintie 2  
FI-15150 LAHTI, FINLAND  
Tel. +358 3 3394 611  
Fax +358 3 3394 6144

merivaara@merivaara.fi  
www.merivaara.com  
ID No. FI15046941  
Domicile Lahti

Nordea Bank Finland Plc  
Corporate Br., Lahti  
SWIFT code: NDEAFIHH

EUR 151930-128930  
USD 151952-11501  
SEK 151952-11519  
NOK 151952-11527

IBAN FI0315193000128930  
IBAN FI4215195200011501  
IBAN FI4115195200011519  
IBAN FI1915195200011527

24.11.2006

Wir bitten Sie diesen Benutzerhinweis bei der Inhandnahme des Körperhalteturts 460 zu verfolgen.

Falls irgendwelche Fragen, Bezugs Benutzung des Rosé geriatrischen Stuhles oder seine Zusatzteile anfallen sollten, bitten wir Sie Kontakt mit dem Merivaara Kundenservice aufzunehmen.

Merivaara Oy  
After Sales  
Puustellintie 2  
15150 LAHTI  
FINLAND  
e-mail: [REDACTED]@merivaara.fi  
tel. +358 3 [REDACTED]

Mit freundlichen Grüßen  
Merivaara Corp.

[REDACTED]  
Factory Manager