

weber dental

D- 70597 Stuttgart Sigmaringer Str. 258 Telefon (0711) 726723-0
Telefax (0711) 726723-90 www.weber-dental.de eMail info@weber-dental.de

SUPERIUM® Paint On Feineinbettung

Für oxydarme, glatte Güsse!

SUPERIUM Feineinbettung reduziert die Oxydbildung der Gußlegierung; verbessert die Gußoberfläche; erleichtert und verkürzt das Abstrahlen.

Anwendungshinweise für Binder-Einbettmassen

Bei Verwendung von Binder-Einbettmassen müssen Kunststoff-Flexetten vor der Überbettung mit Einbettmasse durch flüssige Feineinbettung abgedeckt werden. (Ein Hauch von Überzug genügt.)

Anwendungshinweise für phosphatgebundene Einbettmassen

Bei Verwendung von phosphatgebundenen Einbettmassen muß die Feineinbettung in noch feuchtem Zustand überbettet werden!

Verarbeitung

- Feineinbettung vor dem Auftragen gut aufrühren (am besten mittels unseres Magnetrührers) und mittels einem Haarpinsel die gesamte Modellation überziehen.
- Am besten: Feineinbettung vor Pinsel (Größe 8-10) über die Modellation laufen lassen, bzw. vorherschieben anstatt zu *überpinseln*. (Vermeidet Lufteinschlüsse!)
- Nicht zu dick und niemals zweimal auftragen.
- Überschuß abschütteln oder abblasen damit ein möglichst gleichmäßiger Überzug entsteht.
- Je nach Raumtemperatur ca. 10 Min. antrocknen lassen, dann überbetten.
- Bei phosphatgebundenen Einbettmassen muß die Feineinbettung in noch feuchtem Zustand überbettet werden!

SUPERIUM Feineinbettung kann mit destilliertem Wasser verdünnt werden wenn im Laufe der Verarbeitung die Konsistenz zu dickflüssig geworden ist.

Unser Spezieller Tip

Sollte einmal ein Muffelriß auftreten, den Sie schon vor dem Guß erkennen, können Sie die Muffel *kitten bzw. abdichten* indem Sie SUPERIUM Feineinbettung direkt auf den Riß der glühenden Muffel auftragen. (mit Metallspatel o.ä.). Sie verhindern damit das Durchschießen des Metalls und können so Ihren Guß noch retten, vorausgesetzt die Muffel übersteht den anschließenden Gußvorgang.