

# elite soft relining primer

Priming agent for dentures for relining  
with A-silicones (Elite Soft Relining)

IT - EN - FR - ES - DE - PT - NL - FI - EL - DA - NO - SV  
SL - PL - CS - RO - HR - HU - SK - LV - LT - ET - BG



 **Manufacturer**  
**DS Dental Supply GmbH**  
D-22607 Hamburg, Germany

**EU Distributor**  
**Zhermack S.p.A.**  
Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) Italy  
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596  
info@zhermack.com | www.zhermack.com

**ELITE SOFT RELINING PRIMER** dient zur **Haftvermittlung** zwischen **ELITE SOFT RELINING** und der Prothese.

## VORBEHANDLUNG DER PROTHESE

Die alte, vorhandene Unterfütterung vollständig entfernen. Die zu unterfüttern- de Basis ca. 1-2 mm abschleifen. An den Rändern vestibulär, lingual bzw. dorsal auf einer Höhe von circa 2-3 mm eine mindestens 1 mm tiefe Stufe einarbeiten. Die Prothesenränder abrunden. Die zu unterfütternden Flächen müssen aufgear- raht sein.

Die Prothese nach der Vorbehandlung gründlich reinigen. Spuren von Fett mit reinem medi- zinischem Alkohol entfernen und die Prothese trocknen lassen.

## AUFTRAGEN VON ELITE SOFT RELINING PRIMER ZUR HAFTVERMITTLUNG

Alle gesäuberten, beschliffenen und zu unterfütternden Flächen, auf denen das Material haften soll, gleichmäßig und vollständig flächendeckend mit **ELITE SOFT RELINING PRI- MER** bestreichen. Primer ca. 1 Minute trocknen lassen. Flasche nach Gebrauch sofort wieder verschließen. Speichel, Feuchtigkeit oder Monomerflüssigkeit verhindern eine Haftung von **ELITE SOFT RELINING** auf der Prothese. Anschließend die Prothese mit **ELITE SOFT RE- LINING** unterfüttern. Dazu die Gebrauchsanweisung für **ELITE SOFT RELINING** beachten.

## LAGERUNG

Nicht über 25°C (77°F). lagern. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

## GARANTIE

DS Dental Supply GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellfeh- lern ist. DS Dental Supply GmbH übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Ga- rantie bezüglich Veräußerlichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produk- tes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von DS Dental Supply GmbH in der Reparatur oder dem Ersatz des DS Dental Supply GmbH -Produktes.

## HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für DS Dental Supply GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.

**FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN!**  
**NUR FÜR DEN ZAHNÄRZTLICHEN GEBRAUCH!**