

Dräger DrugTest® 5000 Test Kit

Das System Dräger DrugTest® 5000 besteht aus zwei Hauptkomponenten: den DrugTest 5000 Test-Kits und dem DrugTest 5000 Analyzer. Es stellt ein schnell und genau arbeitendes System zur Überprüfung von Speichelproben z. B. auf Amphetamine, sogenannte Designer-Amphetamine, Opiate, Kokain und dessen Abbauprodukte, Benzodiazepine, Cannabinoide oder Methadone dar.



Für eine einfache Handhabung ergonomisch gestaltet und unverzüglich einsatzbereit, besteht dieser neuartige Testsatz aus einem Hauptteil, einer Testkassette, zu welcher ein Speichelsammler gehört. Es ist auf einfache Weise mit oder ohne Handschuhe entweder mit der rechten oder linken Hand zu bedienen und schließt jegliche Fehlinterpretation dadurch aus, dass ein genaues Ergebnis angezeigt wird. Aus einem starren porösen Material mit kapillaren Eigenschaften hergestellt, ist dieser nichtinvasive Test zudem hygienisch zu handhaben, da jeglicher Kontakt mit der Probe und ihren Bestandteilen vermieden wird.

Der Nachweistest wird in fünf einfachen Schritten ausgeführt und verhindert Fehlbedienungen.

Zunächst wird die Schutzkappe vom Speichelsammler entfernt und die Testkassette dem Probanden ausgehändigt. Dieser führt dann den Aufnehmer in den Mund ein und entnimmt durch Bewegung zwischen der Wange und dem Zahnfleisch eine

Speichelprobe. Sobald eine hinreichende Flüssigkeitsmenge aufgenommen wurde, verfärbt sich die integrierte Anzeige blau und die Testkassette kann an den Bediener zurückgegeben werden. Der Bediener, welcher den gesamten Probenahmevorgang überwacht hat, führt dann die Testkassette und die Patrone in den Analyzer ein und wartet die Ausgabe des Ergebnisses ab, welches nach einigen Minuten deutlich angezeigt wird. Einzelne Proben können leicht zugeordnet werden, indem die Testkassette mit Namen und Datum beschriftet wird. Sofern es erforderlich ist, kann der Dräger DrugTest® 5000 in Verbindung mit dem Dräger DCD 5000 Speichelprobensammler genutzt werden, um eine zweite Probenahme zu ermöglichen sowie die Aufbewahrung und den Transport der Proben zu Zwecken einer Laboranalyse. In Kombination mit dem Dräger SSK5000 ist es möglich in wenigen Minuten sicher festzustellen, ob eine verdächtige Oberfläche, Zubereitung oder Substanz zu einer Gruppe der benannten Rauschgifte gehören kann oder nicht.



Das Dräger DrugTest® 5000 Test Kit: unkompliziert, schnell, zuverlässig und sicher im Test auf Drogen.

BESTELLINFORMATIONEN

Benennung

Jedes Dräger DrugTest® 5000 Test-Kit besteht aus einer in einem Beutel abgepackten Probensammler-Testkassette und einer Patrone.


	Bestell-Nr.
Dräger DrugTest® 5000 Training Test-Kit	83 19 970
Dräger DrugTest® 5000 Test-Kit für 6 Drogen	83 19 830
Dräger DrugTest® 5000 Test-Kit für 6 Drogen (USA Version)	83 19 965
Dräger DrugTest® 5000 Test-Kit MTD für 6 Drogen	83 20 930
Dräger DrugTest® 5000 Test-Kit für 2 Drogen	83 19 990*
Packungsgröße: jeweils 20 vollständige Test-Kits	

Zubehör

Dräger DCD 5000 – Speichelprobensammler	83 19 910
Dräger SSK 500 Oberflächen Test Kit	83 20 490


* in Entwicklung (auf Anfrage)

DRÄGER DRUGTEST® 5000 – DER TEST WIRD IN 5 EINFACHEN SCHRITTEN DURCHGEFÜHRT:

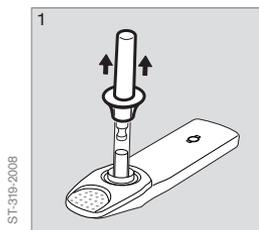


ST-319-2008

Entfernen der Schutzkappe

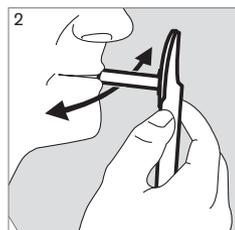


ST-320-2008

Einführen des Probensammlers in den Mund

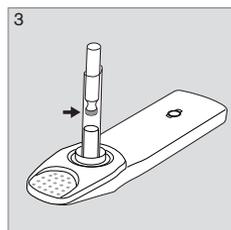


ST-321-2008

Die integrierte Anzeige verfärbt sich blau

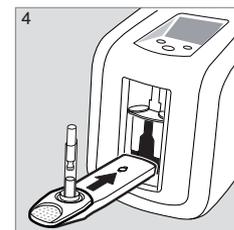

ST-322-2008

Testkassette und Kartusche in den Analyzer stecken

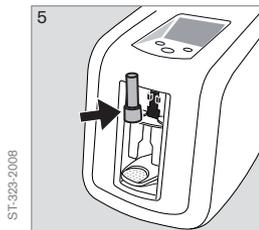

ST-323-2008

Das Ergebnis wird in eindeutiger Weise angezeigt

Aufbewahrung und Lagerbeständigkeit

Test-Kits sind bei Temperaturen zwischen 4 und 30 °C (39 bis 86 °F) und in den Original-Folienbeutel-Verpackungen aufzubewahren. Verwenden Sie keinen Test-Kit, dessen umhüllender Folienbeutel beschädigt ist und beispielsweise Löcher oder Einrisse aufweist. Nach dem Öffnen ist das Test-Kit unverzüglich zu verbrauchen. Wenn das deutlich sichtbar auf dem Folienbeutel aufgedruckte Verfallsdatum überschritten ist, darf das Test-Kit nicht mehr verwendet werden.