

EndoActivator®

DE

NUR FÜR DEN ZAHNÄRZTLICHEN GEBRAUCH

SCHWINGHEBEL-ERSATZSET

INHALT: 1 SCHWINGHEBEL REF A0916, 2 BLAUE KAPPEN, 1 SILBERSTIFT

1) ACHTUNG:

Laut US-Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch einen Zahnarzt oder auf Bestellung eines Zahnarztes abgegeben werden.

2) REPARATURANLEITUNG:

Das sichtbare distale Ende des Schwinghebels ist abgebrochen, wenn es nur knapp über die blaue Kappe am Handstückkopf hinausragt (**ABBILDUNG B**). Das nicht sichtbare proximale Ende des Schwinghebels im Handstückkopf kann bei unsachgemäßem Gebrauch ebenfalls brechen. In beiden Fällen ist das Handstück funktionsunfähig, da kein Activator Tip mehr angebracht und/oder durch Betätigung des EIN/AUS-Schalters in Schwingungen versetzt werden kann. Der Schwinghebel muss ausgewechselt werden.

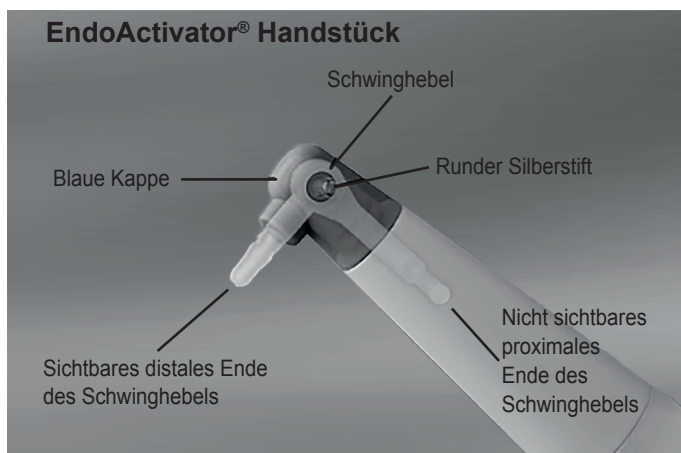


Abbildung A


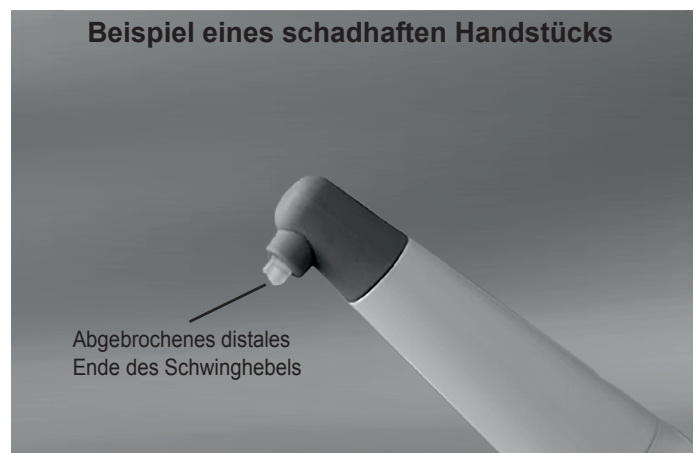


Abbildung B

3) ZUR REPARATUR ERFORDERLICH:

- Schwinghebel-Ersatzset
- Watte-Pinzette
- Skalpell (optional)
- Cyanacrylat-Klebstoff (optional)

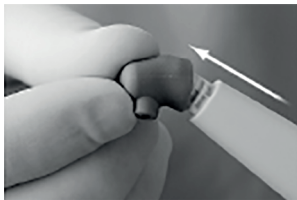

1. Den Kopf des Handstücks gut festhalten und die werksseitig angeklebte blaue Kappe vorsichtig abziehen. Die Kappe mit Daumen und Zeigefinger greifen, vom Handstückkopf abziehen und dann entsorgen.



2. Gegebenenfalls Klebstoff- und/oder Silikonreste der blauen Kappe mit einem Skalpell entfernen, um eine saubere Oberfläche zu erhalten.



3. Zur Entfernung des Schwinghebels den Handstückkopf gut festhalten und mit der Spitze der Watte-Pinzette fest und kontrolliert gegen den runden Silberstift drücken, so dass er zur Seite geschoben wird. Den Stift so weit herausschieben, bis der Schwinghebel frei beweglich ist. HINWEIS: Der Stift wird dabei manchmal ganz aus dem Handstückkopf geschoben.



4. Wenn der Silberstift weit genug zur Seite geschoben ist, lässt sich der schadhafte Schwinghebel entfernen. Den Schwinghebel mit Daumen und Zeigefinger vorsichtig herausziehen und entsorgen.



5. Den Silberstift in seiner Position belassen und den neuen Schwinghebel aus dem Reparaturset nehmen. Das proximale Ende des Schwinghebels in den Handstückkopf einschieben, bis es richtig sitzt. HINWEIS: Darauf achten, den Schwinghebel in der korrekten Richtung einzusetzen.



6. Wenn sich das Loch im Schwinghebel auf einer Höhe mit den Löchern im Handstückkopf befindet, den Silberstift mit dem Griff der Watte-Pinzette in seine Ausgangsposition zurückschieben. Hierbei den Handstückkopf gut festhalten. Bei Bedarf ist im Reparaturset ein Ersatzstift zu finden.









7. Eine neue blaue Kappe aus dem Reparaturset nehmen und über das sichtbare distale Ende des Schwinghebels sowie den Handstückkopf streifen. Für eventuellen späteren Bedarf liegt eine weitere Ersatzkappe bei. Nach dem korrekten Anbringen der blauen Kappe ist das Handstück repariert und betriebsbereit.



8. Falls gewünscht, kann die blaue Kappe mit einem Cyanacrylat-Klebstoff befestigt werden. Vorsichtig erst einen Tropfen Klebstoff wie dargestellt auftragen, und dann einen zweiten Tropfen genau entgegengesetzt auf der Unterseite des Handstücks. Das Ankleben verringert die Gefahr einer ungewollten Lockerung der blauen Kappe beim Betrieb des Handstücks. **VORSICHT:** Zu viel Klebstoff kann die Bewegung des Schwinghebels behindern oder vollständig blockieren.

Beim künftigen Betrieb des EndoActivator® wird der befestigte Activator Tip nach Abschluss der klinischen Anwendung wie folgt vom Handstück entfernt: Den Kopf des Handstücks mit dem Daumen der einen Hand gut festhalten und die weiße, schalenförmige Schutzvorrichtung am Activator Tip mit dem Daumen und dem Zeigefinger der anderen Hand greifen. Bei gut festgehaltenem Handstück den Activator Tip **GERADE** herausziehen. Der Kopf des Handstücks und der Activator Tip müssen bei der Entfernung in einer Linie ausgerichtet sein. Den Activator Tip nur in gerader Richtung einund ausstecken. **NIEMALS** durch Drehung im oder gegen den Uhrzeigersinn entfernen. Der Activator Tip darf bei der Entfernung **NIEMALS** einem Drehmoment ausgesetzt, also z.B. verdreht oder verwunden, werden. Die Activator Tips sind nur für einen Patienten vorgesehene Einmalartikel.

Weitere Informationen: siehe Karte **EndoActivator® WARNHINWEISE / GEWÄHRLEISTUNG**.

Symbole	DE
	Hersteller
	Siehe Gebrauchsanweisung
	Geöffnete Verpackung, nicht ersetzbar
	LOT - Nummer
	Wird nicht einzeln verkauft
	Anwendungsteil vom Typ B

PATENT NO. 7,261,561 AND OTHER PATENTS PENDING

EC REP

Hersteller / in China hergestellt



Endo Inventions, LLC
122 S. Patterson Avenue, Ste. 206
Santa Barbara, CA 93111 USA

Vertrieb durch

Maillefer Instruments Holding Sàrl
Chemin du Verger, 3
CH-1338 Ballaigues
Schweiz
dentsplysirona.com

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20,
2514 AP, The Hague,
The Netherlands
Phone:
+31.70.345.8570
Fax:
+31.70.346.7299

CE
0086