



# i-STAT ALINITY

## PRODUCT UPDATE

### MAI 2023 SOFTWARE VERSIONSHINWEISE

#### VORGESCHRIEBENE SOFTWAREAKTUALISIERUNG

Diese Softwareaktualisierung ist obligatorisch. Dieses Dokument enthält Informationen über die neue OSi18-Software für das i-STAT Alinity-Instrument sowie Aktualisierungen der i-STAT Alinity-Dokumentation.

Die fortlaufenden Verbesserungen bei der Herstellung des i-STAT Systems machen es erforderlich, dass von Zeit zu Zeit die Standardwerte aktualisiert werden, um eine langfristige Leistungskonsistenz zu gewährleisten. Diese Aktualisierungen entsprechen einer manuellen Anpassung der Kalibrierung bei einem herkömmlichen Analyzer in einem Labor.

Neue OSi-Software -- Lieferung zweimal pro Jahr:

- stellt diese Standardwerte wieder her und integriert Verbesserungen im internen Qualitätsprüfsystem.
- ermöglicht, dass das i-STAT Gerät neu eingeführte Kartuscentypen erkennen und etwaige neue Funktionen ausführen kann.

#### AKTUELLE SOFTWARE

**Die aktuelle Software, OSi17, läuft am 19. Juli 2023 ab.**

Fünfzehn Tage, bevor die Software abläuft, werden Nutzer in einer Meldung auf dem Gerät auf das bevorstehende Ablaufdatum aufmerksam gemacht. Wenn diese Aktualisierung nicht bis zum 19. Juli 2023, 08:00 Uhr, durchgeführt wird, zeigt das Gerät eine Warnung an, dass die Software abgelaufen ist und die Tests deshalb deaktiviert sind.

#### NEUE SOFTWARE

**Die neue Software, OSi18, läuft am 17. Januar 2024 ab.**

Stellen Sie vor der Durchführung der Softwareaktualisierung auf OSi18 sicher, dass auf Ihrem Gerät die aktuelle OSi17-Software installiert ist.

#### SOFTWARE HERUNTERLADEN

Die Software für das i-STAT Alinity-Instrument ist auf der Global Point of Care Website erhältlich. Die Datei hat das Format .apkg und ist nicht gezippt. Die .apkg-Datei muss vor der Verwendung nicht entzippt oder extrahiert werden.

Besuchen Sie die Support-Seite von i-STAT 1 und i-STAT Alinity unter [www.globalpointofcare.abbott](http://www.globalpointofcare.abbott), um die Datei herunterzuladen. Klicken Sie auf den Login-Link für die i-STAT Alinity Ressourcen und anschließend auf die i-STAT Alinity Systemsoftware. Dort müssen Sie sich mit Ihren Benutzerdaten anmelden, um auf die Systemsoftware zugreifen zu können.



## **WERTEZUWEISUNGSÜBERSICHTEN (VAS und eVAS)**

Wertezuweisungsübersichten (VAS und eVAS) für die neue CLEW D46 können über die Abbott Point of Care-Website unter [www.globalpointofcare.abbott](http://www.globalpointofcare.abbott) heruntergeladen oder ausgedruckt werden.

## **ANWEISUNGEN ZUR AKTUALISIERUNG DER GERÄTESOFTWARE**

Die System-Bedienungsanleitung (SOM) enthält genaue Anweisungen zur Aktualisierung der Gerätesoftware. Um die Software zu aktualisieren, folgen Sie den Anweisungen in Abschnitt 1.13 Softwareaktualisierungen.

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen zum Herunterladen von Software direkt auf das Gerät über den Abbott Managed Server sowie zum Herunterladen von Software von der Support-Seite für i-STAT 1 und i-STAT Alinity unter [www.globalpointofcare.abbott](http://www.globalpointofcare.abbott).

**Hinweis:** Wenn Sie die automatische Pass/Fail-Anpassung für Kontroll- oder Kal./Ver.-Tests verwenden, müssen Sie das neue eVAS nach der Softwareinstallation herunterladen.

## **i-STAT ALINITY-SYSTEM DOKUMENTATIONSAKTUALISIERUNG**

### **i-STAT ALINITY SYSTEM BETRIEBSHANDBUCH (SOM) VERSIONSHINWEISE**

Es stehen keine Aktualisierungen des i-STAT Alinity SOM zur Verfügung. Beim derzeit auf der APOC-Website veröffentlichten SOM aus der Softwareversion vom November 2022 handelt es sich um die aktuelle Version.