


Informationsblatt des ThinPrep® Pap Test™

Anweisungen zur Verwendung der Bürste/des Spatels

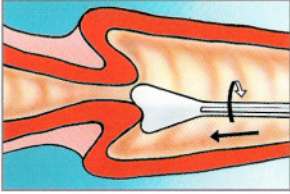


Entnahme...

...eines geeigneten Ektozervixabstrichs mit einem *Plastikspatel*.



Abspülen...

...des Spatels in der PreservCyt®-Lösung. Drehen Sie den Spatel zehnmal energisch im Behälter um. Werfen Sie den Spatel weg.

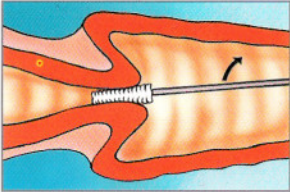


Entnahme...

...eines geeigneten Endozervixabstrichs mit einem endozervikalen Bürstengerät. Führen Sie die Bürste in die Zervix ein, bis nur noch die untersten Fasern sichtbar sind. Drehen sie die Bürste langsam um eine viertel oder halbe Drehung in eine Richtung. **DREHEN SIE NICHT ZU WEIT.**



Abspülen...

...der Bürste in derselben PreservCyt®-Lösung. Drehen Sie das Gerät zehnmal in der PreservCyt®-Lösung und schieben Sie es dabei gegen die Wand des Plastikbehälters. Drehen Sie die Bürste kräftig, um noch mehr Abstrichmaterial abzuspielen. Werfen Sie die Bürste weg.

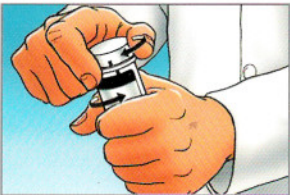

Aufschrauben...

...des Deckels bis die Drehlinie des Deckels die Drehlinie des Behälters überdeckt.



Eintragen...

...des Namens und der Kennnummer der Patientin auf dem Behälter.
...der anatomischen Daten der Patientin auf dem Begleitformular.




Versand...

...des Behälters und Begleitformulars in einem Präparatbeutel ins Labor.


Informationsblatt des ThinPrep® Pap Test™

Anweisungen zur Verwendung des besenartigen Entnahmegärts

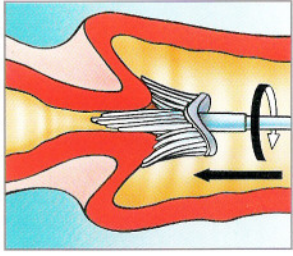


Entnahme...

...eines geeigneten Zervixabstrichs mit einem „besenartigen“ Entnahmegär. Führen Sie die mittleren Borsten des Besens so tief in den Zervixkanal ein, bis die kürzeren Borsten voll mit der Ektozervix in Kontakt sind. Drehen Sie den Besen fünfmal nach rechts.

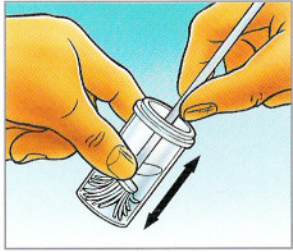


Abspülen...

...des Besens in der PreservCyt®-Lösung, indem Sie ihn zehnmal gegen den Boden des Plastikbehälters drücken und dabei die Borsten auseinanderschieben. Zuletzt drehen Sie den Besen kräftig, um noch mehr Abstrichmaterial auszuspülen. Werfen Sie das Entnahmegär weg. Lassen Sie nicht den Borstenteil des Entnahmegärts in der Lösung zurück.

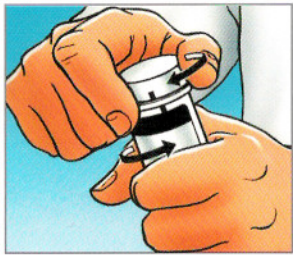

Aufschrauben...

...des Deckels, bis die Drehlinie des Deckels die Drehlinie des Behälters überdeckt.

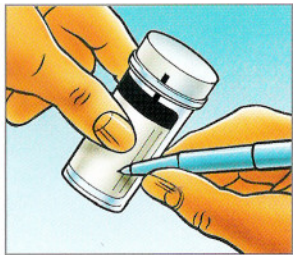

Eintragen...

...des Namens und der Kennnummer der Patientin auf dem Behälter.

...der anatomischen Daten der Patientin auf dem Begleitformular.



Versand...

...des Behälters und Begleitformulars in einem Präparatbeutel ins Labor.

THE
ThinPrep®
PAP TEST™