

VitalBase FallDetector

67605/16



Allgemeine Beschreibung

Der VitalBase FallDetector dient zur automatischen Auslösung von Notrufen bei schweren Stürzen mit anschließender Bewegungslosigkeit (z.B. aufgrund von Bewusstlosigkeit). Zusätzlich verfügt er über eine Ruftaste, durch die eine manuelle Notrufauslösung möglich ist. Der VitalBase FallDetector wird wie eine Armbanduhr am Handgelenk getragen.

Sobald der VitalBase FallDetector eine Erschütterung registriert, beginnt er mit der Analyse des Ereignisses. Erfolgt in den nächsten etwa 30 Sekunden keine Bewegung, löst er einen Notruf aus. Damit wird sichergestellt, dass nur schwere Sturzereignisse mit folgender Bewegungslosigkeit gemeldet werden.

10 Sekunden, bevor der Notruf endgültig ausgelöst wird, vibriert der VitalBase FallDetector. Das gibt dem Benutzer die Möglichkeit, einen Fehlalarm zu verhindern, indem er einfach den Arm bewegt.

Ausstattung und Funktionen

- In Verbindung mit S.A.M. 4 Geräten
- Automatische Rufauslösung bei Sturz gefolgt von Bewegungslosigkeit
- Vibration vor Alarmauslösung zur Verhinderung von Fehlalarmen
- Integrierte Ruftaste zur manuellen Auslösung eines Notrufes
- LED-Auslöseanzeige leuchtet rot, wenn ein Notruf ausgelöst wird
- Beim Rufempfänger Anzeige von unterschiedlichen Rufarten für Sturz und manuelle Rufauslösung
- Sturzerkennung kann abgeschaltet werden
- Ergonomisches Design
- Gehäuse aus hypoallergenem Kunststoff
- Armband aus strapazierfähigem Polyurethan (18 mm breit)
- Nicht-wechselbare Lithium-Batterie
- Automatischer Hintergrundruf zur Servicezentrale, wenn Batteriekapazität der Batterie zur Neige geht.
- Staubdicht und geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser (IP 67)
- Funkreichweite abhängig von den räumlichen Gegebenheiten bis zu 250 m im Freien

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT): 47 x 40 x 18 mm
 Gewicht: 50 g
 Farben: Gehäuse grau, Ruftaste und Armband: schwarz
 Funkfrequenz: 869,2125 MHz
 Batterie: Li-Batterie CR2477
 Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre
 Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
67605/16	VitalBase FallDetector	